

ガーゼをテープ固定する トレーニングに最適

ヒト肌に近い専用皮膚シート（バイオスキン）は、
テープがしっかり付きます



看護師教育の技術項目（71項目）
ドレーン類の挿入部の処置 対応品

ドレーン部 処置モデル **BDP-182**

BDP-182は、ガーゼの固定練習用皮膚シートです。
患者役の方が付属のインナーウェア装着後、胸部・腹部に
載せてお使いください。製品裏面は適度の粘着性を持ち、
インナーウェアから滑り落ちることを防ぎます。

Size : 182mm × 260mm × 厚み5mm


【内容物】	ドレーン挿入用皮膚(大)	3枚
	インナーウェア(フリーサイズ)	3枚

自由な部位に貼りつけ、ガーゼの交換



人工皮膚「バイオスキン」は、サージカルテープがしっかり
貼り付き、且つきれいに剥がすことが可能です。
お好みの場所に皮膚を貼り付けて、お使いください。

創傷部は着色が可能

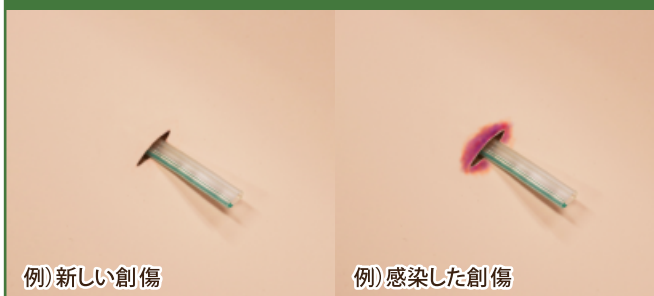

例)新しい創傷

例)感染した創傷

一般的なメイク用具を使い、症例に合った創傷部の化膿
状況を表現することができます。
ご使用後は、リムーバーで落としてください。

ドレーンの挿入



ドレーンを皮膚中心部に挿入し、固定する練習が可能です。
中心部の穴は繰り返しのトレーニングでも裂けないよう、
内部に補強材が入っています。

洗浄可能



皮膚シート裏面の粘着性が低下した場合は、水洗いする
だけで、簡単に粘着性が戻り、繰り返しの使用が可能です。