

バイオスキン医療教材シリーズ

産褥乳房モデル装着型

乳房のやわらかさと質感を 限りなく追及しました

ボディメカニクスに基づいた演習は、
リアルな装着型シミュレータで



発案企画・共同研究開発
渡邊 香 国立看護大学校 准教授
戸津 有美子 国立看護大学校 助教

母乳マッサージ 授乳トレーニング用 **BMS-12**

医療施設の母乳外来で行うマッサージの指導や、
看護大学、専門学校での乳房の視診、触診の演習に最適。

【内容物】

| | | |
|-------|----|----------------|
| 乳房 | 2個 | (*)左右の区別はありません |
| 専用ウェア | 1組 | |
| 収納ケース | 1組 | |

人工皮膚バイオスキンだからできること

周産期のリアルな乳頭、乳輪部



周産期における乳頭、乳輪部の色素やモントゴメリー腺を、
リアルに再現。看護大学、看護専門学校での教育のほか、母乳
外来での指導用としても最適です。

やわらかい質感



一般的なシミュレータでは製造が困難な、やわらかい乳房を
再現しました。現実に近い感触でのトレーニングは、技術の
向上に繋がります。

高いメンテナンス性



専用ウェアは洗濯が可能。乳房は取り外して水洗いができます。
乳房の消毒は、希釀したエタノールで表面を拭いてください。
清潔さを保った状態でお使いいただけます。

体型に合わせた調節機能



様々な体型の方に装着いただけるよう、専用ウェアにはマジック
テープがついています。体にフィットするよう調節できます。

*当商品に、乳児のモデル人形は付属しません。別途ご用意ください。

*当社のシミュレータは樹脂製教材です。人体と同条件で施術できることを保証するものではありません。

*バイオスキンは、株式会社レジーナの登録商標です。

内容物

◆ 乳房



産褥期の特徴を有した乳房です。
左右の区別はありません。

◆ 特徴

- ・ヒトの乳房に近い弾力
- ・ヒトに近い色調
- ・リアルなモントゴメリーブラ

◆ 専用ウェア



前面用 1枚



後面用 1枚

乳房を入れるポケットのあるほうが、前面になります。

使用方法

医療施設の外来、病棟での保健指導(授乳やマッサージ)や、看護大学、専門学校での演習(乳房観察、授乳指導、乳房マッサージ技術等)に最適です。

1 乳房を専用ウェア(前面用)のポケットにはめる



2 肩部のベルクロを振りで繋げ、専用ウェアを肩にかける



3 乳房の高さや向きが左右対称になるように、肩部のベルクロを調節する



4 専用ウェアの左脇部をベルクロで留める



5 専用ウェアの右脇部をベルクロで留める



6 身体に合うよう、各部のベルクロを調節
乳房がすれていかないか確認



使用風景

現実に即した様々な姿勢で演習ができます。ヒト肌に近い素材であるため、質の高い疑似体験が可能です。

(※)被験者の体型によって乳房が体にフィットしない時は、タオル等を巻いてからお使いください。



乳頭マッサージの指導



仰臥位での指導



授乳の指導

製造元 株式会社 レジーナ

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2

Tel.048(836)2600 Fax.048(837)0099 info-b@bioskin.jp

URL. <https://www.bioskin.jp>

検索

販売店

QR コード



(2023.4 改訂版)